

Hansaplast® WUNDSPRAY

Zur Reinigung von akuten Wunden, wie z.B. Schnittwunden, Schürfwunden, kleineren Brandwunden 1. und 2. Grades sowie offenen Blasen. Kann auch bei chronischen und postoperativen Wunden nach Arztanweisung eingesetzt werden. Auch geeignet für Kinder und empfindliche Haut.

- Reinigt Wunden schnell und einfach
- Schützt vor Wundinfektionen
- Besonders hautfreundliches, farbloses Spray

Die drei Schritte der Wundversorgung:

1. Eine saubere und gereinigte Wunde ist der erste Schritt für eine optimale Heilung. Reinigen Sie Ihre Wunde mit diesem Hansaplast® Wundspray, um die Wunde effektiv vor Wundinfektionen zu schützen.
2. Schützen Sie Ihre Wunde mit einem Pflaster oder sterilen Wundverband von Hansaplast® vor äußeren Einflüssen wie Schmutz und Bakterien, um eine ungestörte Heilung zu ermöglichen.
3. Unterstützen Sie die natürliche Wundheilung und reduzieren Sie das Risiko von Narbenbildung, indem Sie Hansaplast® Wundsalbe regelmäßig bis zur vollständigen Heilung auftragen.

Anwendung:

Blutung stoppen. Aus einer Entfernung von ca. 10 cm auf die gesamte Wunde sprühen, um Schmutz und sichtbare Partikel zu entfernen. Wenn notwendig, wiederholen. Die Wunde und die umliegende Haut vorsichtig trocknen. Verklebte oder verkrustete Verbände können mit dem Hansaplast® Wundspray befeuchtet werden, um sie einfach zu entfernen.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen:

- Bei größeren Wunden mit viel Exsudat oder Zeichen einer Infektion sollte ein Arzt kontaktiert werden.
- Im Zweifel sollte bei Brandwunden ein Arzt aufgesucht werden, um den Schweregrad der Brandwunde festzustellen.
- Nur zur äußeren Anwendung bei Wunden.
- Bei Rötung, Schwellung oder Schmerz im Wundbereich, wenn sich der Zustand verschlechtert oder wenn der Wundheilungsprozess nicht innerhalb weniger Tage einsetzt, sollte ein Arzt aufgesucht werden.
- Bei Schwangeren oder stillenden Müttern sowie bei Kindern unter 2 Jahren sollte vor der Anwendung ein Arzt aufgesucht werden.

Kontraindikationen:

Nicht anwenden:

- In Verbindung mit anderen lokal anzuwendenden Präparaten, wie z.B. Cremes, im gleichen Hautbereich.
- In Verbindung mit anionischen Tensiden, Seifen, Ölen, Gelen etc.
- Bei bekannten Allergien gegen einen der Inhaltsstoffe.
- Im Mittel- oder Innenohr und im Bereich der Augen.
- Dauerhaft für mehr als 30 Tage.
- Nicht schlucken.

Nebenwirkungen:

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in seltenen Fällen während der Anwendung eine Hautirritation oder ein Ausschlag auftreten kann. Wenn Sie eine solche Reaktion oder andere Symptome bemerken, beenden Sie die Anwendung und wenden Sie sich an einen Arzt. Sollten Sie unerwartete oder potentiell schwerwiegende Symptome im Rahmen der Anwendung dieses Produkts beobachten, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, den Hersteller und Ihre nationale Gesundheitsbehörde.

Packungsgrößen:

Sprays in 15 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml. Möglicherweise sind nicht alle Verpackungsgrößen in allen Ländern zum Verkauf registriert.

Zusammensetzung:

0,1 % Decylglucoside Tensid und 0,04 % Polihexanid (PHMB) als Konservierungsmittel in Ringerlösung.

Lagerhinweise:

Bewahren Sie die Anwendungshinweise solange auf, wie Sie das Produkt verwenden. Nur unbeschädigte Sprays verwenden. Das Ablaufdatum und die Chargennummer sind auf dem Boden des Sprays aufgedruckt. Nur bis zum Ablaufdatum nutzen. Nach Anbruch 12 Monate haltbar. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Medizinprodukt.

Letzte Überarbeitung der Anwendungshinweise v01-03/2020

*PMCF - Studie, 95 % Zustimmung „Das Wundspray ist schmerzfrei in der Anwendung“, n = 59, Freese R, Arzt, Leiter der klinischen Prüfung, Hamburg, 2019